



GUÍA RÁPIDA



ESPAÑOL

icare
ic200


Solo con receta

ENCENDIDO DEL TONÓMETRO Y CARGA DE LA Sonda

1. Presione el botón de selección o medición para encender el tonómetro. Ilustraciones de estas formas alternativas de empezar: *(No olvide utilizar la muñequera)*

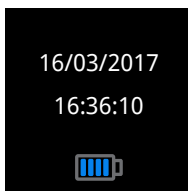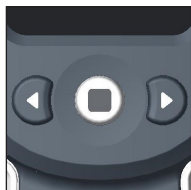


Presione el botón de selección para empezar

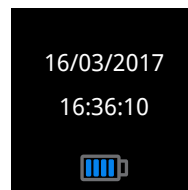

Presione el botón Medir para empezar


2. Abra el tubo de la sonda retirando el tapón e inserte la sonda en la base para sonda tal como se muestra en la imagen.

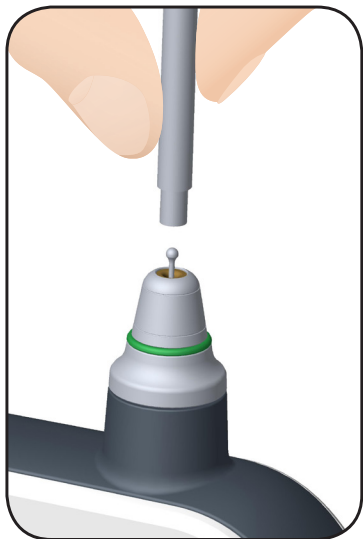

3. Seleccione entre OD (ojo derecho) y OS (ojo izquierdo) pulsando los botones de navegación o no seleccione el ojo. Pulse el botón Seleccionar o el botón Medir para confirmar. Cuando aparezca el símbolo de reproducción en la pantalla, el tonómetro estará listo para realizar mediciones.





*Selección del lado ocular:
OD, sin información, OS*

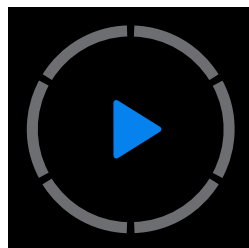

Listo para la medición

4. Asegúrese de que el apoyo para la frente esté completamente extendido girando la rueda de ajuste del apoyo para la frente. La distancia entre la punta de la sonda y la córnea del paciente (consulte la imagen siguiente) debe ser de 4 a 8 mm. Lleve el tonómetro frente al ojo del paciente con la sonda apuntando al centro de la córnea hasta que el soporte para la frente toque la frente. Mantenga la sonda horizontal y apuntando en perpendicular hacia el centro de la córnea. Ajuste la distancia entre la sonda y la córnea del paciente girando la rueda de ajuste del apoyo para la frente. Se puede medir la PIO de un paciente en la posición supina, así como en posiciones verticales (sentado o de pie). No empuje accidentalmente el tonómetro o la sonda hacia el ojo.

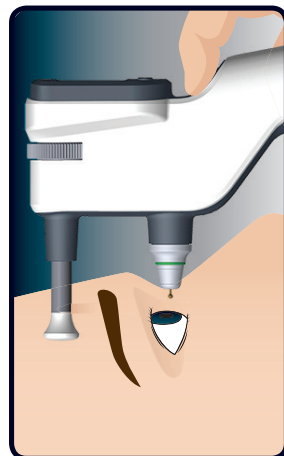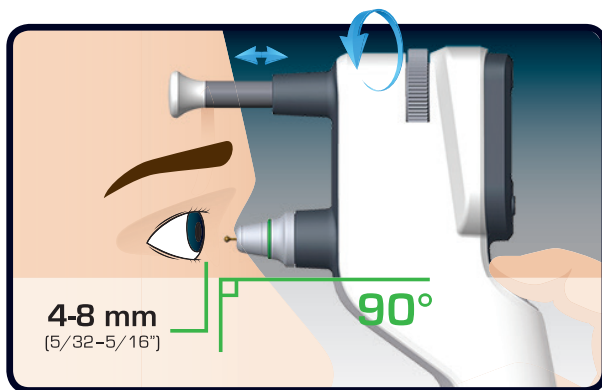

5. La sonda entrará en contacto con el ojo durante las mediciones: mantenga presionado el botón Medir para realizar 6 mediciones seguidas o bien presione el botón brevemente 6 veces para realizar 1 medición cada vez. Los segmentos grises de un círculo de la pantalla se volverán azules uno a uno.




UN TONO CORTO —
Indica que se ha realizado una medición correctamente.

DOS TONOS — —
Indica una única medición incorrecta. (Consulte los mensajes de error en el manual completo).

UN TONO LARGO ———
Indica que se han realizado seis mediciones correctamente y se muestra el resultado de la PIO en la pantalla.

PANTALLA DURANTE LAS MEDICIONES

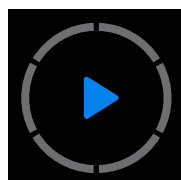

Antes



Después de la
segunda medición



Después de la sexta
medición




Después de la sexta
medición con una
variación aceptable



Después de la sexta
medición con una
variación excesiva

PARTES DEL TONÓMETRO

1. Apoyo para la frente
2. Base para sonda
3. Collarín de bloqueo
4. Pantalla
5. Rueda de ajuste para el apoyo para la frente
6. Botones de navegación de la interfaz de usuario
7. Botón Medir
8. Botón de selección

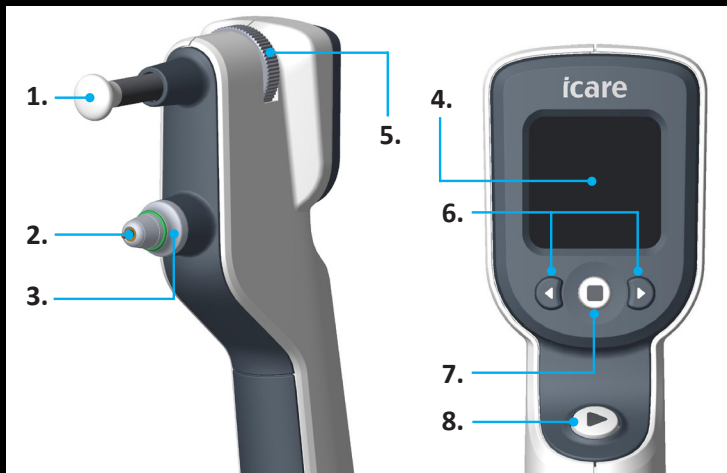

CAMBIE LA BASE PARA SONDA PERIÓDICAMENTE PARA EVITAR REPARACIONES INNECESARIAS.

SUSTITUCIÓN DE LA BASE PARA SONDA

1. Apague el suministro de energía del tonómetro.
2. A mano, desatornille el collarín de la base para sonda y colóquelo en una ubicación segura.
3. Tire de la base para sonda del tonómetro usando el pulgar y el resto de los dedos.
4. Inserte una nueva base para sonda en el tonómetro.
5. Atornille el collarín hasta que bloquee firmemente la base para sonda.

