



Información Importante


CANABRAVA RING

1. Posición de implantación

El anillo Canabrava está compuesto por un anillo de PMMA de 300 ° con una disposición intercalada de pestañas pequeñas. Fig. 1 y pestañas grandes Fig. 2 orientadas arriba y abajo consecutivamente, además de 2 ganchos de estabilización. Fig. 3, posicionados en el anillo de forma alternada- una orientada hacia arriba y la otra hacia abajo.

Importante: Las pestañas inferiores (pequeñas) y los ganchos deben estar debajo del iris y las pestañas superiores (grandes) deben estar arriba.

En caso de colocar el anillo al revés la implantación no será posible.

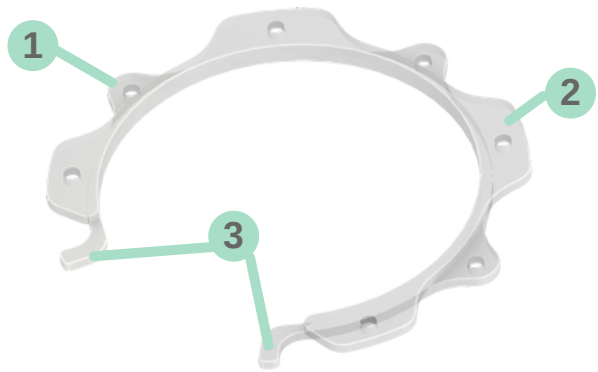

2. Empiece por casos más sencillos.

Al tratarse de una técnica nueva, recomendamos que empiece por los casos más sencillos para que pueda desarrollar la técnica de forma segura.

- Pupilas sin fibrosis
- Pupilas con diámetros de 3,5 a 4,5 mm
- Pupilas con su anatomía preservada.

En nuestra web <https://ajlsa.com/producto/canabrava-2/> podrá encontrar material audiovisual donde se evidencia la eficacia del anillo en pupilas de todos los tamaños, así como fichas técnicas y documentos que completarán el entrenamiento del cirujano.

3. Importancia del diámetro “Blanco a Blanco”

El anillo ha sido diseñado para su implantación en ojos con DIAMETRO BLANCO-BLACO de tamaños habituales o grandes, es decir, tomando como referencia por encima de 11mm de diámetro. Casos especiales como microoftalmo, ojos pequeños, etc: Consultar